

blū gloo
ADESIVO QUE CAMBIA DE COLOR

Mira lo que te estás perdiendo!



Ahora No Lo Ves



blūgloo

ADESIVO QUE CAMBIA DE COLOR

Blūgloo™ es el primer y único adhesivo que provee contraste con color cuando se necesita y es transparente cuando se necesita. La cementación de los brackets y su limpieza nunca habían sido tan fáciles.


Color cuando es necesario

El contraste de color de Blūgloo durante la cementación facilita la cementación rápida y precisa de los brackets y facilita la limpieza del exceso alrededor. A medida en que el Blūgloo se calienta a la temperatura del cuerpo, el color desaparece, permaneciendo transparente durante el tratamiento. Al momento de retirar simplemente aplique un corto chorro de aire frío o de agua para bajar la temperatura de la superficie del adhesivo y el Blūgloo se tomará azul nuevamente para una limpieza fácil y completa.



Especial para brackets estéticos

Blūgloo tiene una afinidad química única con los brackets de alta tecnología tales como los Damon™ 3, proporcionando fuerzas de adhesión confiables aún en los casos más difíciles. La fórmula avanzada de Blūgloo y la estabilidad de su color lo hacen excepcionalmente útil para cementar los brackets Inspire ICE y demás brackets cerámicos.

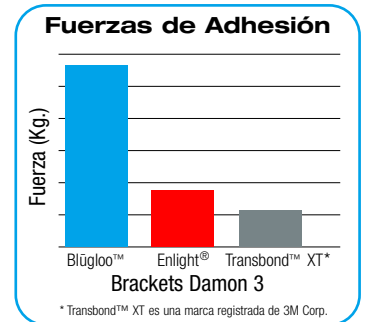

Características de manejo únicas

La fórmula de Blūgloo presenta la combinación ideal de materiales de relleno híbridos para brindar unas características de manejo únicas. * El escurrimiento de los brackets está virtualmente eliminado y el exceso de adhesivo se retira con mucha facilidad.

Excelente tiempo de trabajo

Las propiedades químicas de Blūgloo permiten un excelente tiempo de trabajo bajo la luz del operatorio, brindando la cantidad de tiempo suficiente para ubicar el bracket en posición, retirar los excesos y comenzar a fotopolimerizar.

Versatilidad

Blūgloo tiene una amplia aplicación – su color y composición química ha sido optimizada para los brackets estéticos pero también es excelente para cementar brackets metálicos. Para mayor conveniencia, Blūgloo viene en dos presentaciones, jeringa y kits de Unidose™ (una dosis).

Información para Realizar Órdenes

Contenido del Kit de Jeringas, 740-0274

- 2 Jeringas de Blūgloo (4g), 740-0272
- 1 Frasco de Primer Ortho Solo™ (5ml), 740-0271
- 1 Frasco de Solución para Grabar (10ml), 740-0038
- 38 Pinceles Aplicadores de Sellantes 740-0124**
- 75 Espátulas 740-0075

Contenido del Kit Unidose™, 740-0275

- 4 Paquetes de 10 Unidose Blūgloo (8g total), 740-0273***
- 1 Frasco de Primer Ortho Solo™ (5ml)
- 1 Frasco de Solución para Grabar
- 38 Pinceles Aplicadores de Sellantes
- 75 Espátulas
- 1 Pistola dispensadora de Unidose®, 740-0197



Ordene Hoy!

Contacte su representante de Ormco.

* El 100% de los doctores participantes en esta prueba clínica prefirieron este producto sobre el adhesivo que utilizaban en ese momento.

** Vendido en paquete de 75

*** Vendido en dos paquetes de 10



1717 West Collins Avenue, Orange, CA 92867
www.ormco.com • 800.854.1741 • 714.516.7400

070-5122 Rev. A